

Η εφαρμογή του **HYPERMIX** πάντα περιλαμβάνει τρία απλά βήματα:

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε το τραύμα με φυσιολογικό ορό. Στεγνώστε το απαλά, χρησιμοποιώντας γάζες.



2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τοποθετείστε ομοιόμορφα, την απαιτούμενη ποσότητα έλαιο ή gel στο τραύμα, καθώς και στην υγιή περιοχή γύρω από αυτό



3 ΚΑΛΥΨΗ

Καλύψτε/περιδέστε το τραύμα εάν αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κτηνιάτρου



tips

Για την ορθή εφαρμογή του **HYPERMIX**: σε όλες τις του μορφές, αρκεί να μένει πάνω στην επιφάνεια του τραύματος ένα λεπτό στρώμα του προϊόντος.

Αλλαγή κάθε 1 ή δύο ημέρες ανάλογα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα άλλα αντισηπτικά ή φαρμακευτικά προϊόντα

Εάν το τραύμα έχει νεκρωτική εσχάρα, πρέπει να προηγηθεί μηχανικός/χειρουργικός καθαρισμός.

Το **HYPERMIX** έλαιο, σε θερμοκρασίες <math><16^{\circ}\text{C}</math>, στερεοποιείται. Θερμάνετε το δοχείο και θα επανέλθει στη ρευστή του μορφή χωρίς να έχει υποστεί αλλοίωση.

